

9. Ремонт

Ремонт ширмы включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность ширмы.

10. Утилизация

Ширма, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась ширма по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Ширма медицинская (мод.1) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.113ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код 6879

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

**Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25**


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/23468 от 26.08.2024 г.

 **ЕЛАМЕД**

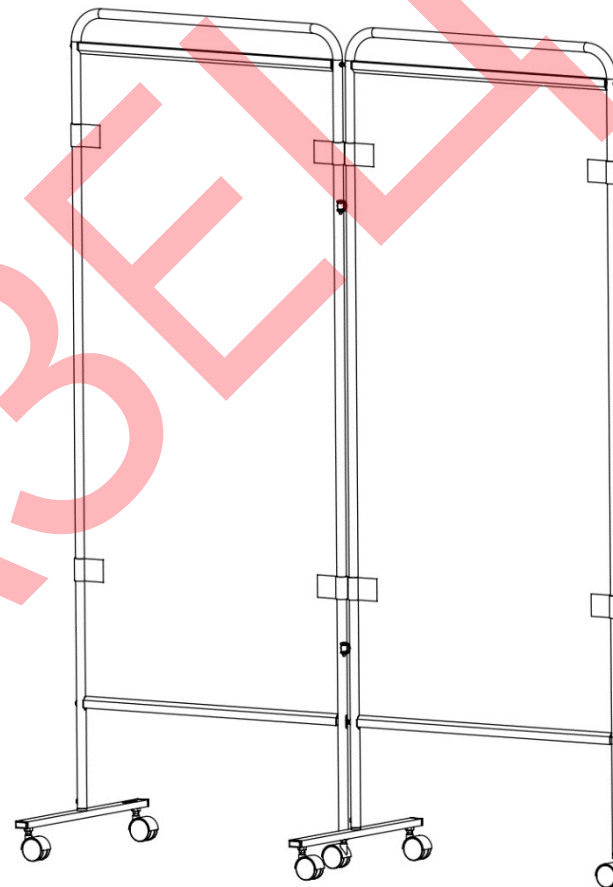

ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.113ТУ

Ширма медицинская (мод.1)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942819.110РЭ**

ОМ №29.1294.03 от 24.04.2024 г.

Ширма медицинская (мод.1) (в дальнейшем - ширма), предназначена для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Область применения: для оснащения лечебных и лечебно-профилактических организаций.

Побочные действия: не выявлены.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности: Ненадлежащее использование ширмы может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части ширмы не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация ширмы проводится в медицинских перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на ширму.

! Изменение угла соединения секций производить с ОСТОРОЖНОСТЬЮ во избежание травм.

- 1. Основные параметры и размеры**
- 1.1 Масса изделия: 13,5±1,3 кг.
- 1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (1530x530x1878) ± 10%.
- 2. Характеристики**
- 2.1 Календарный срок службы ширмы – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления ширмы.
- 2.2 Ширма установлена на шесть колёсных опор, снабженных стопором, не регулируемых по высоте.
- 2.3 Усилие, необходимое для передвижения ширмы на колёсных опорах не превышает 15 Н.
- 2.4 Усилие, необходимое для включения стопора колёс не более 15 Н.
- 2.5 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.
- 2.6 Ширмы при эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.
- 2.7 Каркас ширмы изготовлен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены две секции, соединенные между собой ввертными петлями. Рама каждой секции установлена на три нерегулируемые по высоте колесные опоры, снабженные стопором. Полотно закреплено на две поперечины с дополнительным креплением к раме контактной лентой. Ширма поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Ширма медицинская (мод.1)	1 компл., в составе:
– Рама левая с полотном	1 шт.
– Рама правая с полотном	1 шт.
– Опора	2 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Опора колёсная	6 шт.
– Петля ввёртная М8	2 шт.

– Болт М6х20	4 шт.
– Штифт петли	2 шт.
– Гайка М8	4 шт.
– Шайба 8	4 шт.
- Руководство по эксплуатации	1 шт.
- Инструкция по сборке	1 шт.

- 4. Транспортирование и хранение**
- 4.1 Ширма транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.
- 4.2 Ширма транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).
- 4.3 Условия хранения ширмы в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).
- 5. Дезинфекция**
- Поверхности ширмы устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.
- 6. Правила эксплуатации**
- ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 602101, Владимирская область, г. Меленки, ул. Железнодорожная, д.3, АО «Елатомский приборный завод».**
- Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.
- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.**
- 6.1. Подготовка к работе
- 6.1.1. После хранения ширмы или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10 °C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.
- 6.1.2. Сборка ширмы производится согласно инструкции по сборке.
- 6.2. Ограничения в процессе эксплуатации ширмы.
- Во избежание преждевременного выхода из строя ширмы не допускается подвергать поверхности ширмы воздействию предметов, вызывающих появление царапин или порезов на полотне ширмы
- 7. Гарантия изготовителя**
- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели.
- 7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.
- 8. Техническое обслуживание**
- Техническое обслуживание ширмы включает в себя:
- визуальный осмотр всей конструкции ширмы не реже одного раза в месяц;
 - очистку от загрязнений внешних поверхностей ширмы путём протирания влажной ветошью, с последующей протиркой насухо во избежание появления разводов и пятен;
 - дезинфекцию поверхностей ширмы путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещена ширма.