

9. Ремонт

Ремонт ширмы включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность ширмы.

10. Утилизация

Ширма, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась ширма по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Ширма медицинская (мод.2) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.113ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код 17361

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

**Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25**

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/23468 от 26.08.2024 г.

 **ЕЛАМЕД**

 **ЕЛАМЕД**

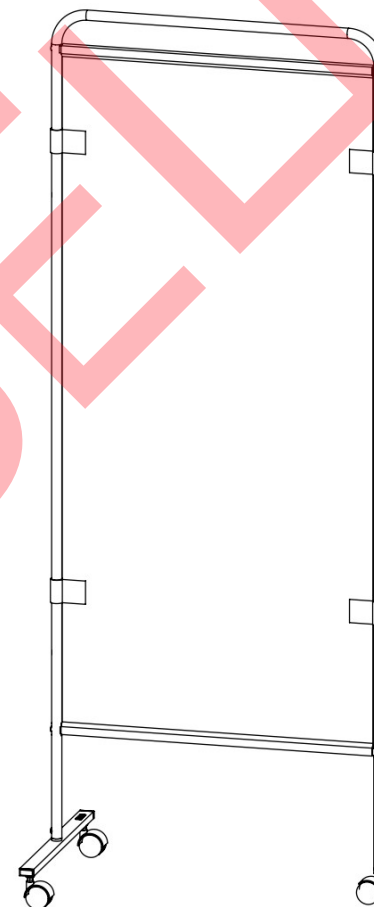

ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.113ТУ

Ширма медицинская (мод.2)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942819.110-01РЭ**

Ширма медицинская (мод.2) (в дальнейшем - ширма), предназначена для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Область применения: для оснащения лечебных и лечебно-профилактических организаций.

Побочные действия: не выявлены.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование ширмы может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части ширмы не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация ширмы проводится в медицинских перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на ширму.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 6,8±0,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (800x530x1878) ± 10%.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы ширмы – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления ширмы.

2.2 Ширма установлена на три колёсные опоры, снабженные стопором, не регулируемые по высоте.

2.3 Усилие, необходимое для передвижения ширмы на колёсных опорах не превышает 15 Н.

2.4 Усилие, необходимое для включения стопора колёс не более 15 Н.

2.5 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.6 Ширмы при эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.7 Каркас ширмы изготовлен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрена одна секция. Рама установлена на три нерегулируемые по высоте колесные опоры, снабженные стопором. Полотно закреплено на две поперечины с дополнительным креплением к раме контактной лентой. Ширма поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Ширма медицинская (мод.2)	1 компл., в составе:
– Рама с полотном	1 шт.
– Опора	1 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Опора колёсная	3 шт.
– Болт М6х20	2 шт.
- Руководство по эксплуатации	1 шт.
- Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Ширма транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Ширма транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения ширмы в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности ширмы устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 602101, Владимирская область, г. Меленки, ул. Железнодорожная, д.3, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. После хранения ширмы или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10 °C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2. Сборка ширмы производится согласно инструкции по сборке.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации ширмы.

Во избежание преждевременного выхода из строя ширмы не допускается подвергать поверхности ширмы воздействию предметов, вызывающих появление царапин или порезов на полотне ширмы

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ширмы включает в себя:

- визуальный осмотр всей конструкции ширмы не реже одного раза в месяц;
- очистку от загрязнений внешних поверхностей ширмы путём протирания влажной ветошью, с последующей протиркой насухо во избежание появления разводов и пятен;
- дезинфекцию поверхностей ширмы путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещена ширма.