

11. Свидетельство о приемке

Кушетка медицинская (мод.2) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.109 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код 1015002

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17307 от 23 мая 2022 года

ЕЛАМЕД

ЕЛАМЕД

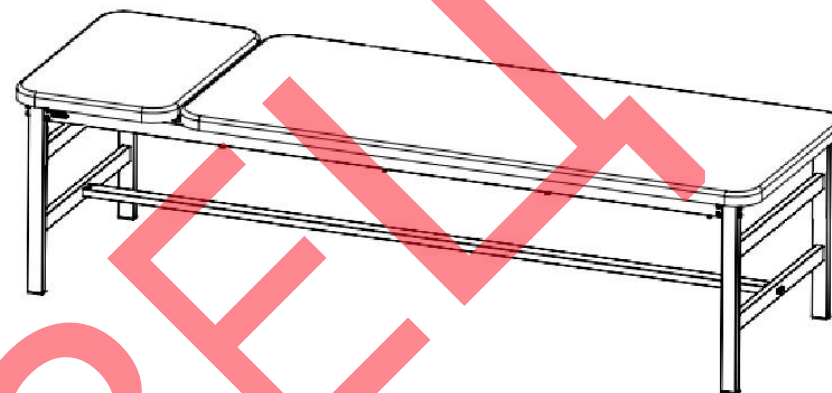

КУШЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.109 ТУ

**КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ
(мод.2)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.324432.102 РЭ**

Кушетка медицинская (мод.2) (в дальнейшем - кушетка), предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций, в том числе реанимационных отделений, в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Показания к применению: для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах клинических подразделений медицинских организаций, в том числе реанимационных отделений, в целях профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование кушетки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! При опускании головной секции следите за тем, чтобы пальцы рук не попали между основанием кушетки и подъёмной секцией !

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать кушетку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание их расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 35,3±3,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (1950х650х525)±20.

1.3 Размеры рабочей поверхности ложа (длина х ширина) мм: (1950х650)±20.

1.4 Размеры рабочей поверхности спинной секции ложа (длина х ширина) мм: (1520х650)±20.

1.5 Размеры рабочей поверхности головной секции лежа (длина х ширина) мм: (420х650)±20.

1.6 Угол между горизонталью и головной секцией регулируется в пределах (°): (от 0 до 40)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики кушетки при равномерном распределении нагрузки:

- на спинную секцию – 140 кг;
- на головную секцию – 20 кг;
- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 160 кг.

2.3 Кушетка установлена на 4 опоры в виде труб, не регулируемые по высоте.

2.4 Усилие, прилагаемое к основанию головной секции для изменения угла положения между горизонталью, не должно превышать 150 Н.

2.5 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием кушетки должно быть 150 мм.

2.6 Зазор между одной из опор в виде трубы и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.7 При эксплуатации кушетка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.8 Каркас изделия изготовлен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием. Опоры выполнены из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием, не регулируемые по высоте. Ложе разделено на 2 секции. Регулировка подъема головной секции от 0° до 40° - при помощи бесступенчатого самозаклинивающегося механизма, спинная секция возможности регулировки не имеет. Мягкие элементы изготовлены из ДСП, на которую уложен слой поролона толщиной 20мм, обтянутый винилискожей. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Кушетка медицинская (мод.2)	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Кушетка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Кушетка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения кушетки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности кушетки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения кушетки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки кушетки проверьте следующее:

- крепёжные элементы кушетки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации кушетки

Во избежание преждевременного выхода из строя кушетки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скопление жидкости на поверхностях кушетки, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности кушетки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 Прочностные показатели кушетки соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кушетки включает в себя:

- поддержание технического состояния кушетки в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей кушетки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей кушетки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт кушетки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность кушетки.

10. Утилизация

Кушетка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась кушетка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».